



## Tecnología segura, altamente efectiva en una solución simple

- Incluye la molécula ácido hipocloroso de origen natural
- Rápidamente mata 99.999% de *MRSA*, *VRE*, *Acinetobacter baumannii*, *E.Coli*, y otros patógenos infecciosos en solución sólo en 15 segundos en pruebas de laboratorio sin resistencia microbiana conocida\*
- Se ha demostrado que es extremadamente segura, suave e hipoalergénica: simplemente aplique directamente a las heridas, incluso alrededor de ojos, boca y nariz
- Se han efectuado rigurosas pruebas de seguridad: no citotóxica, no irritante, no sensibilizante, no mutagénica, no toxicidad oral
- No resistencia a antibióticos
- No contraindicaciones clínicas para su uso

Si usted tiene alguna pregunta relacionada con cualquier tratamiento contacte a su médico clínico. Para preguntas sobre el producto, contacte PuriCore al 1.866.918.2743.

\* Contacte PuriCore para una lista completa de datos de pruebas antimicrobianas

# vashe

wound therapy

Solución Vashe Terapia de Heridas está diseñada para limpiar, irrigar, hidratar y desbridar lesiones dérmicas agudas y crónicas tales como úlceras de presión de Etapas I-IV, úlceras por estasis, úlceras diabéticas, heridas post-quirúrgicas, quemaduras de primer y segundo grado, abrasiones e irritaciones menores de la piel, además de humectar y lubricar vendajes de heridas absorbentes.

Solución Vashe Terapia de Heridas es una solución segura y biocompatible que incluye ácido hipocloroso (HOCl). En la Solución Vashe Terapia de Heridas, que pasa los requerimientos de la prueba de conservación antimicrobiana USP 51, el HOCl funciona como un antiséptico y previene el crecimiento en solución de patógenos infecciosos.

Vashe Terapia de Heridas se encuentra disponible a través de su distribuidor local de productos médicos.

© 2010 PuriCore, Inc. Todos los derechos reservados. PuriCore y Vashe son marcas comerciales registradas de PuriCore, Inc. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

P/N 0001-0343 Rev. A

RxOnly

**PuriCore**  
Pure Science. Pure Life.

508 Lapp Road  
Malvern, PA 19355  
www.puricore.com  
1.866.918.2743

**Distribuidor Autorizado:**

# vashe®

wound therapy



## Una Solución de Defensa Dérmica Segura, Natural y Efectiva para

- Limpieza de heridas
- Irrigación de desbridamientos
- Manejo de vendajes

**Guía de Uso para Pacientes**



## Aumentando la defensa natural del cuerpo

El cuerpo sabe mucho de cicatrización de heridas. Por esa razón hemos desarrollado una tecnología que imita la producción del cuerpo de una pequeña molécula llamada ácido hipocloroso, generada por glóbulos blancos para luchar contra bacterias dañinas, virus y otros organismos. PuriCore utiliza una combinación simple de agua y sal, totalmente naturales, con electricidad para producir la misma poderosa solución encontrada en el sistema inmunológico del cuerpo.

Vashe Terapia de Heridas es una solución hipoalergénica, pura e inócua para la piel que se aplica directamente a las heridas para limpiarlas y remover el tejido muerto. No arderá o quemará.

Vashe es una solución clínicamente probada que se utiliza en centros de cuidado de heridas y hospitales a lo largo del país.

Vashe Terapia de Heridas, una manera efectiva y totalmente natural de limpiar heridas y abrasiones menores de la piel.

## Una manera simple de limpiar sus heridas

En cada cambio de vendaje:

1	Remueva de la herida todo vendaje usado.
2	Irrigue la herida y la piel intacta circundante con Solución Vashe Terapia de Heridas para remover restos y exceso de secreciones de la herida.
3	Refresque el área tratada con una cantidad adicional de Solución Vashe Terapia de Heridas. En heridas profundas, permita que Solución Vashe Terapia de Heridas penetre en la herida tal como lo indique su médico clínico.
4	Sature una gasa o un vendaje nuevo con Solución Vashe Terapia de Heridas, luego aplique al lecho de la herida durante el tiempo recomendado de hidratación (ver las instrucciones del médico clínico en la página adyacente).
5	Mantenga el vendaje humedecido aplicando cantidades adicionales de Solución Vashe Terapia de Heridas como sea necesario durante el período de hidratación (cada 3-5 minutos).



Paso 4: Sature una gasa.



Paso 5: Mantenga el vendaje humedecido durante el período de hidratación.

## Instrucciones del médico clínico para utilizar Vashe Terapia de Heridas

En cada cambio de vendaje:

Siga los cinco pasos en la página adyacente o como se indica abajo.

En el **Paso 2**, irrigue la herida con aproximadamente \_\_\_\_\_ml de Solución Vashe Terapia de Heridas.

En el **Paso 4**, sature una gasa o un vendaje de heridas nuevo con aproximadamente \_\_\_\_\_ml de Solución Vashe Terapia de Heridas, luego aplique la gasa o el vendaje al lecho de la herida durante \_\_\_\_\_minutos.

### Instrucciones adicionales:

---



---



---



---



---



---



---

Firma del Médico Clínico

Número telefónico del Médico Clínico